

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie haben von der **RAS Team** GmbH / Bereich Orthopädietechnik für Sie oder Ihren Angehörigen eine individuell hergestellte Orthese erhalten. Wir danken für Ihr Vertrauen.

Bitte lesen Sie die vorliegende Gebrauchsanweisung aufmerksam durch, sie enthält wichtige Informationen und **Sicherheitshinweise**. Sie ergänzen bei Erhalt Ihres Hilfsmittels die vom Techniker erfolgten Gebrauchshinweise. Beachten Sie unbedingt alle erhaltenen Hinweise.

**Für weitere Fragen steht Ihnen unser Team gerne auch telefonisch zur Verfügung:
05422 7049830**

1. Gebrauchshinweise
2. Wartung/Kontrolle
3. Pflege und Hygiene
4. Handhabung
5. Entsorgung

Warnhinweise sind mit einem ! gekennzeichnet.

1. Gebrauchshinweise

Die Orthese ist ein orthopädietechnisches Hilfsmittel, das für Sie oder Ihren Angehörigen individuell angefertigt wurde.

- Beachten Sie beim An- und Ausziehen Ihrer Silikon-Orthese die Ihnen detailliert von unseren Technikern/Mitarbeitern gegebenen Anweisungen
- Prüfen Sie die Silikon-Orthese vor jeder Verwendung auf einwandfreien Zustand und ordnungsgemäße Funktion
- Kontrollieren Sie Ihre Silikon-Orthese regelmäßig auf Risse oder sonstige mechanische Beschädigungen
- Überprüfen Sie nach jedem Tragen Ihrer Silikon-Orthese den Zustand Ihrer Hände und Arme
- Achten Sie dabei besonders auf Druckstellen oder Hautverfärbungen (sollten diese sich nach 30min. nicht verringern, wenden Sie sich umgehend bei Ihrem Techniker/Mitarbeiter)
- Führen Sie täglich Hauthygiene und Hautpflege durch
- Lassen Sie Funktion und Passform der Silikon-Orthese regelmäßig von dem für Sie zuständigen Techniker/Mitarbeiter überprüfen

Wenden Sie sich bei allen Problemen mit der Orthese direkt an die Abteilung Orthopädietechnik der RAS Team GmbH.

2. Wartung/Kontrolle

Die Orthese muss kontrolliert/gewartet werden alle

3 Monate 6 Monate 12 Monate

Sowohl die aus medizinisch-therapeutischer Sicht notwendige als auch aus technischer Sicht maximal mögliche Nutzungsdauer der Hilfsmittelversorgung ist abhängig von der individuellen Entwicklung des Patienten. Eine regelmäßige Kontrolle durch Arzt oder/und Orthopädietechniker ist deshalb zwingend erforderlich.

3. Pflege und Hygiene

Das verwendete Silikonmaterial besitzt unter anderem die Eigenschaft, dass Schweiß, Hautfette, Cremes usw. in und durch das Material dringen.

Wenn diese Rückstände durch regelmäßige Reinigung und Pflege nicht entfernt werden, können sie das Material soweit schwächen, dass es zu einem Funktionsverlust und Beschädigungen kommen kann. Daher empfiehlt es sich, an die folgenden Pflegeanweisungen zu halten:

- Reinigen Sie Ihre Silikon-Orthese täglich mit Wasser und einer hautfreundlichen Seife.
- 1-mal monatlich muss die Orthese etwa 20 min. ausgekocht werden. Das muss unter Aufsicht und mit einer ausreichenden Wassermenge geschehen.
- Desinfizieren Sie die Silikon-Orthese bei Bedarf mit dem Ihnen von unseren Technikern/Mitarbeitern genannten Desinfektionsmittel.
- Entfernen Sie vor jedem Reinigungsprozess **-insbesondere beim Auskochen-** die Klettgurte.

! *Führen Sie an Ihrer Silikonorthese keinesfalls selbst Änderungen bzw. Reparaturen durch.*

! *Achten Sie beim Auskochen darauf, dass das Wasser nicht verkochen kann (ausreichende Wassermenge), um einer Beschädigung der Orthese vorzubeugen.*

Wenden Sie sich bei allen Problemen mit der Orthese direkt an die Abteilung Orthopädietechnik der RAS Team GmbH.

4. Handhabung

Die Nummerierung der Klettgurte, sowie auf der Silikon-Orthese dient der richtigen Anordnung der Gurte.

5. Entsorgung

Im Sinne einer geregelten Entsorgung bitten wir Sie, Ihre nicht mehr benötigte Orthese bei uns abzugeben.

**Für weitere Fragen steht Ihnen unser Team gerne auch telefonisch zur Verfügung:
05422 7049830**